



**SIN
LÁTEX**
EN LA FÓRMULA

TIPO PRODUCTO

Apósito de captación bacteriana con hidrogel, listo para usar.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Impregnado con hidrogel
- No contiene conservantes ni agentes químicos activos
- Sin riesgos, ni efectos secundarios,
- No desarrolla resistencia bacteriana
- Sin citotoxicidad
- Reduce los riesgos de alergia
- Estéril
- Disponible en 2 medidas en base a la superficie a tratar

DURABILIDAD

A corto plazo.

PRESENTACIÓN

Envase individual estéril
La caja tiene la marca CE y código de barras.

COMPOSICIÓN

Tejido impregnado de hidrogel de color verde, recubierto con un derivado de los ácidos grasos

Los apósitos Cutimed® Sorbact® no contienen resinas o cauchos naturales que puedan dar reacciones alérgicas.

CUTIMED® Sorbact® gel

INDICACIONES

Tratamiento de heridas secas o poco exudativas, parcialmente necróticas o esfaceladas:

- Heridas crónicas, por ejemplo, úlceras venosas, úlceras diabéticas, úlceras por presión
- Heridas postquirúrgicas y/o dehiscentes
- Heridas tras la extirpación de fístulas y abscesos
- Heridas traumáticas

CONTRAINDICACIONES

Cutimed® Sorbact® gel es un apósito primario que ha sido desarrollado especialmente para heridas secas o bien de escasa exudación, o también parcialmente necróticas.

Cutimed® Sorbact® gel no se debe emplear junto con pomadas o cremas, ya que esos productos entorpecen la fijación de los microorganismos al apósito. En caso de hiperestesia conocida frente al propilenglicol deberá prescindirse del uso de Cutimed® Sorbact® gel.

ESTERILIDAD

El producto se suministra estéril, esterilizado con rayos gama. La esterilización se realiza con métodos normalizados y validados de acuerdo con la norma EN 11137:2015 en pleno cumplimiento de los requisitos generales de seguridad y funcionamiento del Reglamento 2017/745 de productos sanitarios.

RECOMENDACIONES/PRECAUCIONES DE USO

Efectúe un control regular de la herida para poder tomar las medidas adecuadas según el estado de la misma.

Cutimed® Sorbact® gel viene en envase individual. No lo reutilice y no reesterilice. No utilice el apósito si el embalaje está abierto o dañado.

Deseche cualquier vendaje que esté abierto.

PRESENTACIÓN

Código de producto	Medida	Unidades / Envase	Unidades / Embalaje	Envase / Embalaje	EAN Unidad	EAN Envase	EAN Embalaje
72611-20	7,5cm x 7,5cm	10	360	36	7392130001204	7392130001648	7392130003666
72611-21	7,5cm x 15cm	10	200	20	7392130001341	7392130001655	7392130003673
72611-28	15 cm x 20 cm	5	40	8	7392130001594	7392130001938	7392130003741
72611-29	20 cm x 25 cm	5	30	6	7392130001938	7392130002256	7392130003758

Certificación	Contiene látex	Esterilidad	Conservación	Fabricante
Clase UE IIb, estéril Essity Spain SLU ISO 9001:2015 ISO 13485:2016 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018			3 años 	 ABIGO Medical AB Vapenvägen,1 SE-696 33 Askersund Sweden Distribuidor Essity Spain SLU

Leyenda símbolos



No contiene látex



Producto esterilizado con rayos gamma



Caducidad



Manténgase en lugar seco



No exponer el producto a la radiación solar



Fabricante



Distribuidor

Essity Spain, SL (Sociedad Unipersonal)

Ctra. Valls a Puigpelat, Km 2 – 43812 Puigpelat (Tarragona)
 Sede HMS: C/ Fructuós Gelabert,6 - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
 Tel. Atención cliente: 93. 521.01.20 Fax. Atención cliente: 93.521.02.10
 B28451383

www.essity.es