



MICRODACYN60™ WOUND CARE HIDROGEL 120 Grs.

REF 172398

1-COMPOSICIÓN

AGUA ELECTROLIZADA H₂O
CLORURO DE SODIO CLNA. SODIO MAGNESIO FLUORSILICATO (excipiente)
ACIDO HIPOCLOROSO HOCL *HIPOCLORITO DE SODIO NaOCL * *Sustancias
auxiliares tras la tecnología Microcyn patentada)
Microdacyn Hidrogel NO CONTIENE LATEX en su composición.

2-DATOS CLÍNICOS

Indicaciones terapéuticas

Microdacyn60™ Wound Care es un hidrogel de estructura amorfa indicado para utilizarse en el desbridamiento y la hidratación de las heridas, úlceras, cortes abrasiones y quemaduras de naturaleza tanto aguda como crónica. Heridas quirúrgicas, dehiscencias, ostomías. Heridas de origen oncológico y tras radioterapia.

Microdacyn60™ presenta también un efecto antiinflamatorio directo sobre la herida por su mecanismo de acción inhibiendo la cascada inflamatoria.

Es aplicable en mucosas como la boca, nariz, ojo, vagina y oído.

El Ácido Hipocloroso y el Hipoclorito Sódico son sustancias auxiliares con un amplio efecto un efecto antimicrobiano local.

Al reducir la cantidad de microorganismos y contribuir a mantener un entorno húmedo, permite al organismo realizar su propio proceso de cicatrización.

Microdacyn60™ Wound Care puede aplicarse de manera generalizada como parte de un tratamiento integral de heridas y durante todo el proceso cicatricial.

La composición de Microdacyn60™ Hidrogel, no afecta al tejido sano, únicamente a microorganismos unicelulares, imitando el mecanismo de defensa del cuerpo humano.

El hidrogel ha pasado un proceso de electrolizado con la tecnología patentada Microdacyn, que le confiere sus propiedades y una alta estabilidad.

El Ph de Microdacyn60™ es neutro.

Microdacyn60™ Hidrogel es compatible con otros tratamientos.

3-SEGURIDAD

Microdacyn60™ hidrogel es biocompatible para su uso indicado, no irrita la piel, los ojos ni la garganta humanos, y no es un sensibilizador de la piel.

No se requieren precauciones de manipulación especiales.

Microdacyn60™ hidrogel está preparado para su uso, no es necesario mezclarlo ni diluirlo.



MICRODACYN60™ WOUND CARE HIDROGEL 120 Grs.

Ref: 172398

4-MODO DE EMPLEO:

Retire el precinto de seguridad de la botella e introduzca el aplicador deseado, bomba en chorro o spray.
También se puede aplicar directamente desde el envase.
Limpie y seque el área.
Microdacyn60™ hidrogel está preparado para su uso, no es necesario mezclarlo ni diluirlo.
Aplique inmediatamente una capa delgada de Microdacyn60™ hidrogel en la zona afectada.
Cúbralo con el apósito que considere más indicado.
Utilice Microdacyn60™ en cada cambio de apósito de la herida. En caso de infección repita la cura cada 12 o 24 hrs.
Puede aplicarse de manera generalizada como parte de un tratamiento integral de heridas.

5-ADVERTENCIAS Y ASPECTOS QUE HAY QUE TENER EN CUENTA

Si el precinto a prueba de manipulación indebida está roto, no utilice el producto.
Utilice siempre solución nueva, no reutilice el producto.
Uso externo, no apto para inyección o consumo.
No utilice este producto si es alérgico a sus ingredientes.
No utilice Microdacyn60™ hidrogel junto con otras soluciones tópicas sin el asesoramiento de un profesional sanitario.
En caso de heridas graves, profundas, o si le preocupa algún otro aspecto del tratamiento consulte con un profesional sanitario.
Si presenta signos de infección (aumento de dolor, hemorragia, pus etc.) o si la herida no muestra signos de cicatrización, consulte a un profesional sanitario.
El uso Microdacyn60™ hidrogel no excluye el uso de antibióticos sistémicos o locales cuando lo requiere el paciente.
Si presenta una reacción adversa consulte con el profesional sanitario.
Mantenga fuera del alcance y de la vista de los niños.

6-SEGURIDAD PARA EL MEDIO AMBIENTE

Microdacyn60™ hidrogel no es tóxico y es seguro para el medio ambiente terrestre, aéreo y marítimo.
Todos los productos de la tecnología Microcyn™ están certificados por la EPA.
Todos los productos de la tecnología Microcyn™ están certificados por la FDA.
No se requieren condiciones de eliminación especiales.



MICRODACYN60™ WOUND CARE HIDROGEL 120 Grs.
Ref. 172398

7- INTERACCIONES

| |
|---|
| Microdacyn60™ hidrogel no tiene interacciones conocidas con otros productos. Está garantizado durante 24 meses desde su fabricación y 90 días después de la apertura. |
|---|

8-ESTERILIDAD

| |
|---|
| Está garantizada durante 24 meses desde su fabricación y 90 días después de la apertura. Microdacyn 60 Hidrogel no pierde la esterilidad tras su apertura o si se cambia de envase. |
|---|

9-CONSERVACION

| |
|---|
| Microdacyn60™ hidrogel debe conservarse en su recipiente hermético original a condiciones ambiente. Conservar a temperatura ambiente y prevenir el congelamiento. No es inflamable. Después del uso, el recipiente debe cerrarse de nuevo antes de guardarlo. |
|---|

10-ESTABILIDAD

| |
|--|
| La estabilidad y la esterilidad de Microdacyn60™ hidrogel está garantizada hasta la fecha de caducidad (el año y el mes de caducidad AAAAMM se indican en el frasco). Cuando lo abra, anote la fecha en el frasco, en el apartado “fecha de apertura”. La estabilidad y la esterilidad del hidrogel está garantizado durante 60 días después de la apertura. |
|--|

Microdacyn Hidrogel 120 grs está disponible en farmacias con la misma referencia.

Microdacyn60 es un producto cuyo uso está recomendado a los profesionales por el ABHC (American Board of Health Care) debido a su eficacia y seguridad, y la imposibilidad de que se creen resistencias o mutaciones por su uso continuado, y todas sus indicaciones están aprobadas por la FDA.

C/ Concepción Arenal 281-283 local 2 – 08030 Barcelona – Telf: 933602477-936761653 - Fax 933469594

